

動物用

クリーンエアー
Clean Air

内容量
2kg



クロス・メディカルサービス株式会社

本社	東京都墨田区両国4-2-8	TEL:03-3633-6333	FAX:03-3633-1333
西日本支店	大阪府大阪市西区鞠本町2-4-1	TEL:06-6967-8778	FAX:06-6967-8780
九州支店	福岡県福岡市博多区中呉服町3-25	TEL:092-263-8880	FAX:092-263-8817

麻酔用余剰ガス吸着装置 交換用吸着ボトル

クリーンエアー

① 交換時期

- ・使用頻度により異なりますが、通常半年～1年を目安にしてください。
- ・定期的に重量を量り、重量が増加しなくなったら交換してください。

② 交換目安

- ・初期重量 約 2,500g (ボトル重量含む)
 - ・ハロタン 初期重量+800g ～ 1,000g
 - ・イソフルラン 初期重量+800g ～ 1,000g
 - ・セボフルラン 初期重量+600g ～ 800g

③ 取扱い及び保管上の注意

- ・内容物を取り出す場合、吸入したり目や皮膚に触れないように、防塵マスク、安全眼鏡(ゴーグル)、手袋などの適切な保護具を着用してください。
- ・取り出した内容物は、ポリエチレン、ポリプロピレン、クラフト紙などの袋、容器に入れてください。
- ・水濡れ、高湿にならないよう直射日光を避け、湿気の少ない屋内に保管してください。
- ・本製品は動物用です。

*アダプター



商品コード	商品名	JANコード
52201	クリーンエアー交換ボトル	4580364832012
52202	クリーンエアー交換ボトルアダプター付	4580364832029
52203	クリーンエアー交換ボトル用アダプター	4580364832036

(医療機器適用外)